



## ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

# OPASTER'ANIOS και BANDELETTES OPASTER'ANIOS (δείκτες)

### ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- Διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα
- Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του διαλύματος με ειδικό δείκτη ελέγχου
- Σταθερότητα του διαλύματος εμφύσησης: 14 ημέρες



ANIOS 5L


# OPASTER'ANIOS

Απολυμαντικό υψηλού βαθμού για ιατρικές συσκευές

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μπλε διαυγές διάλυμα
- Δραστικό κατά του Clostridium difficile
- Διάλυμα ορθοφθαλαδεΐδης 0,55% με pH 7
- Ευρεία συμβατότητα με όλους τους τύπους υλικών

## INSTRUCTIONS FOR USE

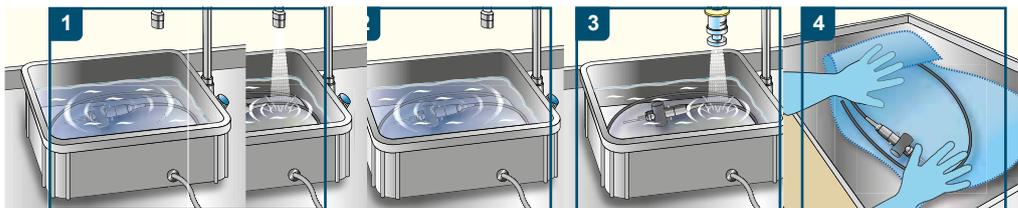

**1** Στάδιο προ-απολύμανσης: Καθαρίζετε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά. Για τον εξοπλισμό ενδοσκόπησης: βουρτσάστε τα κανάλια.

**2** Στάδιο απολύμανσης: Ρίξτε το διάλυμα. Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο επαφής των 5 λεπτών. Διατηρείτε το λουτρό εμβάπτισης καλυμμένο κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής. Για τον εξοπλισμό ενδοσκόπησης: φροντίστε ώστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει στο εσωτερικό των καναλιών. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο OPASTER'ANIOS.

**3** Ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 μm) για να απομακρύνετε κάθε ίχνος του προϊόντος. Για τον εξοπλισμό ενδοσκόπησης: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα της ιατρικής συσκευής.

**4** Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Κρατήστε την ιατρική συσκευή άσηπτη όσο το δυνατόν μέχρι την επόμενη χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο της ορθοφθαλαδεΐδης με έναν δείκτη ελέγχου OPASTER'ANIOS στην αρχή κάθε ημέρας, κατά την επανεκκίνηση μετά από διακοπή και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Μέγιστη διάρκεια ζωής του λουτρού εμβάπτισης: 14 ημέρες (7 ημέρες για τη Γαλλία.)

## ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βακτηριοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13727/EN 14561	5 λεπτά
Ζυμοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13624/EN 14562	5 λεπτά
Μυκητοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 13624/EN 14562	5 λεπτά
Φυμαιοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14348/EN 14563	5 λεπτά
Μυκοβακτηριοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14348/EN 14563	5 λεπτά
Δραστικό έναντι των ιών με περιβλημα* σύμφωνα με τα EN 14476/EN 17111	5 λεπτά
Ιοκτόνο* σύμφωνα με τα EN 14476/EN 17111	5 λεπτά
Σποριοκτόνο* σύμφωνα με το EN 17126	30 λεπτά

\*= καθαρές συνθήκες

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Opaster'Anios	Δοχεία 4 x 5 L	870135
Opaster'Anios	Δείκτες ελέγχου (κουτί των 50)	870136

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απολύμανση υψηλού βαθμού ιατρικών συσκευών: χειρουργικού και ιατρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ενδοσκόπησης και εξοπλισμού ευαίσθητου στη θερμοκρασία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διάλυμα έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε. Καθαρίστε και ξεπλύνετε προσεχτικά την ιατρική συσκευή προτού την βυθίσετε στο OPASTER'ANIOS.

1. Στάδιο προ-απολύμανσης: Καθαρίστε την ιατρική συσκευή με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό προϊόν. Ξεπλύνετε καλά. Για εξοπλισμό ενδοσκόπησης: βουρτσάστε τα κανάλια.
2. Στάδιο απολύμανσης: Ρίξτε το διάλυμα. Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο επαφής των 5 λεπτών. Διατηρείτε το λουτρό εμβάπτισης καλυμμένο κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής. Για εξοπλισμό ενδοσκόπησης: φροντίστε ώστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει στο εσωτερικό των καναλιών. Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο OPASTER'ANIOS.
3. Ξεπλύνετε με άφθονο αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2 μm) για να απομακρύνετε κάθε ίχνος του προϊόντος. Για εξοπλισμό ενδοσκόπησης: ξεπλύνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα της ιατρικής συσκευής.
4. Στεγνώστε με πετσέτα μίας χρήσης. Κρατήστε την ιατρική συσκευή άσηπτη όσο το δυνατόν μέχρι την επόμενη χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο της ορθοφθαλαδεΐδης με έναν δείκτη ελέγχου OPASTER'ANIOS στην αρχή κάθε ημέρας, κατά την επανεκκίνηση μετά από διακοπή και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Μέγιστη διάρκεια ζωής του λουτρού εμβάπτισης: 14 ημέρες (7 ημέρες για τη Γαλλία.)

## ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ρυθμιστικό διάλυμα ορθο-φθαλαδεΐδης (0,55%), χρωστική ουσία, άρωμα.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Επικίνδυνο - να τηρούνται οι προφυλάξεις κατά τη χρήση (που καταρτίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση: μεταξύ +5°C και +25°C.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η πλήρης αντιμικροβιακή δράση για το Opaster'Anios περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, ο οποίος διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

## ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος.

# BANDETTES OPASTER ANIOS (δείκτες ελέγχου)

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

50 δείκτες ελέγχου του επιπέδου ορθοφθαλδαδεΐδης στο διάλυμα OPASTER'ANIOS.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βυθίστε τον δείκτη για ένα δευτερόλεπτο και απομακρύνετε το πλεονάζον υγρό χτυπώντας το άκρο του δείκτη σε απορροφητικό χαρτί
- Ανάγνωση μετά από 60 δευτερόλεπτα  
Ομοιόμορφο ροζ - ΑΠΟΔΕΚΤΟ  
Ανομοιόμορφο ροζ - ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
- Ποτέ μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα πριν περάσουν 60 δευτερόλεπτα (1 λεπτό) από τη βύθιση
- Για την συχνότητα χρήσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του OPASTER'ANIOS

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ


Κλείνετε τον περιέκτη αφού πάρετε έναν δείκτη. Φυλάσσεται σε μέρος χωρίς υγρασία. Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Διατηρείται για 90 ημέρες μετά το άνοιγμα. Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία του ακολουθώντας όλες τις προφυλάξεις χρήσης. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

## ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:

**Αποδεκτό**  
Ομοιόμορφο ροζ

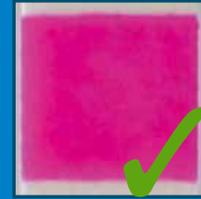

**Μη αποδεκτό**  
Ανομοιόμορφο ροζ

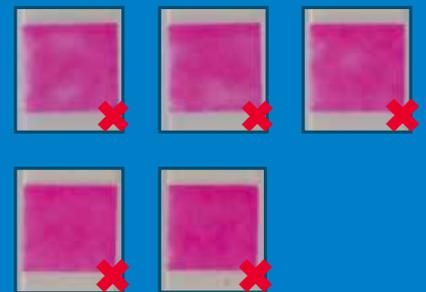



**LABORATOIRES ANIOS**

1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France